

AED使用の手順

小学生以上～大人


① 【電源を入れる】

機種により…

- ・ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ
- ・電源ボタンを押すタイプ

② 【電極パッドを貼り付ける】

パッドに書かれた絵のとおり、
直接素肌にしっかりと貼り付ける

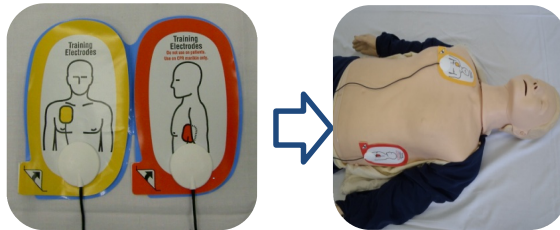

▲小学生～大人用電極パッド

貼り付け時に特に注意をはらうべき状況

- ・胸が濡れている → 乾いた布やタオルで胸を拭く
- ・貼り薬がある → 剥がす → 残った薬剤を拭き取る
- ・医療器具が胸に埋め込まれている → 出っ張りを避ける



注意

未就学児用パッド・未就学児モードは、
小学生～大人に対しては、使用しないこと！

※未就学児用パッド・未就学児モードは乳児を含む未就学児に使用します

③ 【心電図の解析】

「身体から離れて下さい」等のメッセージで、
心電図の自動解析が始まる。

※このとき、傷病者の身体には触れないでください！

④ 【電気ショックと心肺蘇生】

解析

「ショックが必要です」

「ショックは不要です」

充電・ショックボタン点灯

ショックボタンを押す

ショックボタンは傷病者の
体に触れていないことを確
認してから押してください

ただちに
胸骨圧迫から
心肺蘇生を再開

AEDは、2分おきに自動解析します。
そのつど発せられる音声メッセージに従い、
心肺蘇生をできるだけ**絶え間なく**続けましょう。

救急隊に引き継ぐまで

AEDの電極パッドは、傷病者の胸から
剥がさず、電源も入れたままにしておく。

乳児を含む未就学児

① 【電源を入れる】

機種により…

- ・ふたを開けると自動的に電源が入るタイプ
- ・電源ボタンを押すタイプ

② 【電極パッドを貼り付ける】

パッドに書かれた絵のとおり、
直接素肌にしっかりと貼り付ける



未就学児



乳児

▼未就学児用パッド



※未就学児用パッドがない場合
小学生～大人用パッドを代用

小学生～大人用パッドを代用する場合は、
パッドどうしが接触しないように！

◎未就学児モードを搭載した機種もある

(未就学児モードでは小学生～大人用パッドを使用)

① ② の手順の際も胸骨圧迫は続けましょう！！